

Concentrador de oxígeno alto flujo NewLife Intensity 10

AIRSEP®



Parte delantera del equipo



1. Interruptor de encendido/apagado.
2. Botón de reinicio. Es el fusible que protege al equipo de picos de energía.
3. Horómetro digital para registro de horas.
4. Medidor de flujo y perilla de ajuste.
5. Salida de oxígeno.
6. Asas de transporte.
7. Instrucciones de funcionamiento.

Parte trasera del equipo



8. Filtro de entrada de aire.
9. Cable de poder.
10. Llantas.

ForpreSalud IPS
CONFIANZA Y BIENESTAR

Telefono Fijo: 607-6986037

Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24 h.: 322 2805312

Instrucciones de uso

1. Ubique el equipo en un área plana, con ambiente limpio, ventilada y lejos del sol. No olvide retirar el vinipel antes de utilizar el equipo. **No cubra el equipo.**

2. Para hacer uso del vaso humidificador gire la tapa en dirección contraria a las manecillas del reloj para destaparlo. Vierta agua de botella, botellón o filtro hasta la marca del vaso y gire la tapa para cerrarlo. **No use agua de la llave o hervida.** Colóquelo en la parte superior del equipo y ajústelo con la correa de velcro.

3. Coloque el vaso humidificador en el espacio destinado para esto y ajústelo. Luego, conecte el tubo del vaso a la salida de oxígeno y al conector situado en la tapa del vaso humidificador.

4. Desenrolle completamente el cable de poder y úselo para conectar el equipo a la red eléctrica, de 110/220 V y 3 A. **No haga uso de extensiones o adaptadores.**




Instrucciones de uso

5. Encienda el equipo haciendo uso del interruptor, poniéndolo en la posición "I". Habrá una alarma visual y sonora a modo de prueba para verificar el estado de la alarma.

6. Para comenzar el suministro de oxígeno, gire suavemente la perilla del flujómetro hasta la cantidad de litros por minuto (L/min) indicada por el médico. Para aumentar el flujo gire la perilla hacia la derecha y para disminuirlo hacia la izquierda.

7. Al usar la cánula de oxígeno, conéctela a la salida del humidificador. Luego, déjela reposar sobre las orejas del paciente e inserte el tubo nasal en las fosas nasales.

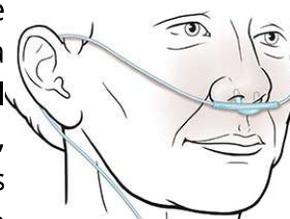

8. Cuando termine la terapia con oxígeno, coloque el interruptor en la posición "O" y desconéctelo de la corriente.

Recomendaciones

Al menos una vez por semana lave el filtro de aire, ubicado en la parte posterior, con agua y jabón. Cambiar diariamente el agua del humidificador.

Ante cualquier alarma verifique si hay obstrucciones en las mangueras. Si las alarmas persisten, comuníquese con nosotros.

El área donde se ubique el equipo debe estar totalmente despejada, en al menos 1 m², para evitar sobrecalentarlo.

Recuerde que puede hacer cambio de los insumos cada 3 meses.

No permita que personal ajeno a la institución realice el mantenimiento del equipo. Tenga en cuenta que el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 12 meses después de recibirlo.

El equipo se entrega en calidad de préstamo, por lo que daños en este o la no devolución generan cobro de pagaré.

No dude en comunicarse con nosotros si tiene dudas