

Concentrador de oxígeno portátil

Philips SimplyGo Mini

PHILIPS




 **ForpreSalud IPS**
CONFIANZA Y BIENESTAR

Fijo: (607) 6986037


Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24h: 322 2805312

Descripción general del equipo

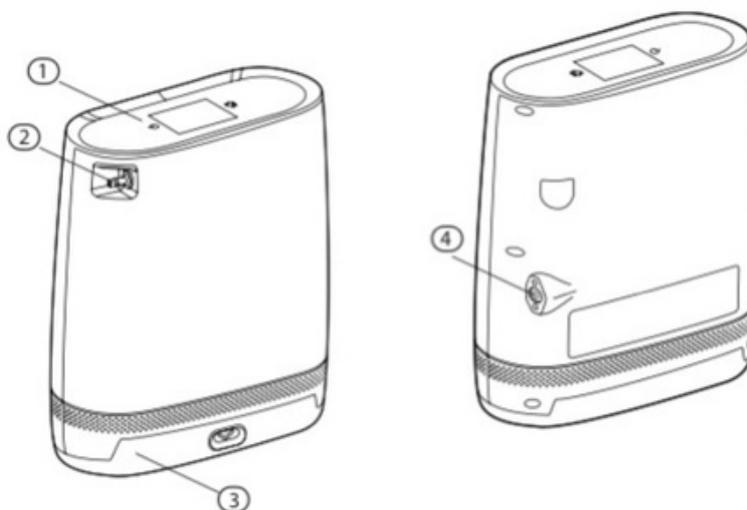

- 1) Panel de control**
- 2) Conexión cánula del paciente**
- 3) Batería recargable**
- 4) Conexión para entrada de alimentación**

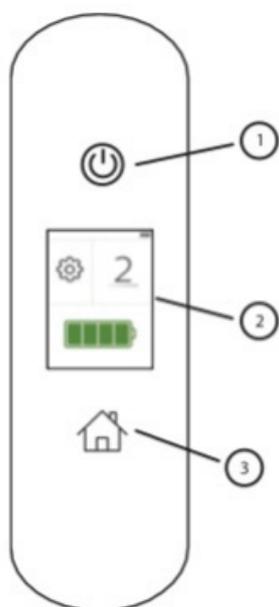


- 1) Botón de encendido/apagado**
- 2) Pantalla**
- 3) Botón de inicio**

Instrucciones de uso

1. Conexión de la cánula

Conecte la cánula nasal al conector de la cánula del paciente como se puede observar en la figura. Asegúrese de posicionar bien la cánula.

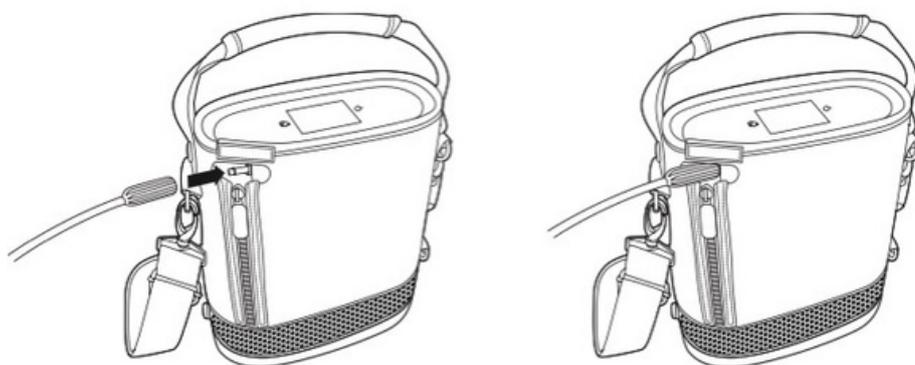

2. Colocación de la cánula nasal

Coloque la cánula nasal en el rostro del paciente tal como se muestra en la siguiente imagen, una vez puesta, el paciente debe respirar con normalidad.



Instrucciones de uso


3. Encendido

Pulse el botón de encendido/apagado una vez o simplemente toque la pantalla negra del equipo para ver los ajustes (Ajuste O2, batería, horas de uso, versión de software).



4. Puesta en marcha del equipo

Pulse el botón de encendido/apagado por segunda vez, antes de que transcurran 5 segundos desde la primera pulsación, para poner en funcionamiento el equipo (suministrar el flujo de oxígeno).

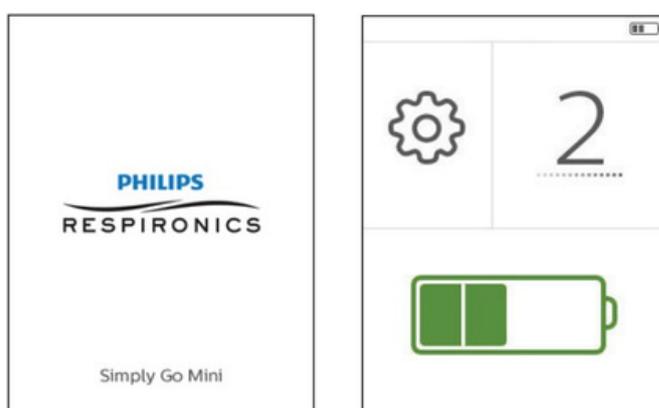

Instrucciones de uso

5. Cambiar el ajuste del flujo de O2

Pulse el número de O2 que se muestra en la pantalla, que permitirá el acceso al ajuste de O2. Luego, con los botones "+ o -" aumente o disminuya según la necesidad (son 5 niveles en incrementos de 1).



6. Apagado del equipo

Para apagar el equipo, pulse el botón de encendido/apagado, aparecerá una pantalla de confirmación. Pulse nuevamente el botón de encendido/apagado para apagar el equipo.



Instrucciones de uso

Alimentación del equipo

La batería empezará a cargarse en el momento en que el equipo esté conectado a una toma de CA (no importa si está en uso o no).




Para que el equipo funcione con alimentación CC de un automóvil u otro vehículo a moto, asegúrese de tener la batería instalada. Para que cargue la batería debe estar en el ajuste 4 o 5.

Batería del equipo

La batería del equipo cuenta con las siguientes características según la configuración del paciente.

- **Hasta 4,5 horas (ajuste de pulso de 2 a 20 RPM con batería estándar)**
- **Hasta 9 horas (ajuste de pulso de 2 a 20 RPM con batería ampliada)**

Para verificar el estado de carga de la batería haga lo siguiente: Toque el símbolo de la batería en la pantalla de inicio, que se muestra en la imagen.

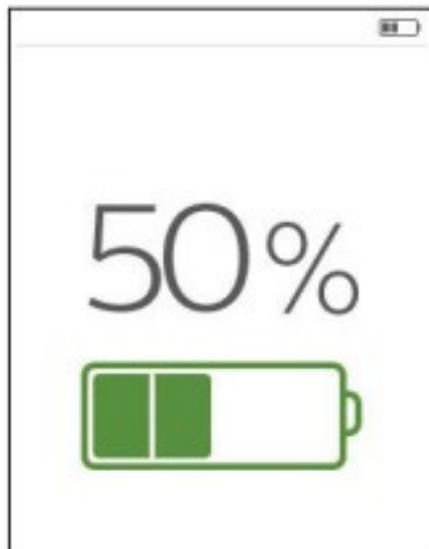

El número con porcentaje que aparece indica la capacidad de batería que queda, y el símbolo de nivel de batería aparece bajo el número.

Recomendaciones de uso

La primera vez que cargue la batería, asegúrese de cargarla por completo.

Utilice el cable de alimentación a la pared, no el cable de alimentación a conexión de vehículo.

Cuando finalice la carga de la batería almacene el cable de alimentación. El tiempo de carga máximo es de 4 horas para la batería estándar y de 8 horas para la batería ampliada.

Advertencias

- No utilice el equipo sin la batería instalada.
- Utilice el equipo solamente según lo prescrito por el médico tratante.
- El oxígeno contribuye a la combustión. No utilice el equipo mientras fuma ni en presencia de llamas desprotegidas.
- No usar este equipo mientras el paciente se encuentre en su vivienda, usar el concentrador estacionario.
- No ubique el equipo en lugares con agua o muy húmedos.
- No deje caer el equipo ni lo golpee.

Recepción de la guía de manejo rápido

Firma paciente: _____

Cédula paciente: _____

Recuerde que al momento en que se le entrega el equipo, el responsable firma un pagaré el cual se hará efectivo en caso de que el equipo presente algún tipo de daño generado por mal uso.

Para más información visite: forpresalud.com.co/oxígeno